

# 神寶醫資輔聽器

## 配對流程與聽力補償設定說明

### ● Android APP 配對流程

STEP1: 手機掃描 QR CODE 配對輔聽器

STEP2: 下載完成，打開依序操作即可完成配對

#### APP 下載






**啟動配對模式**

長按雙耳輔聽器下鍵，看到藍燈閃爍後放開。

藍色指示燈閃爍中

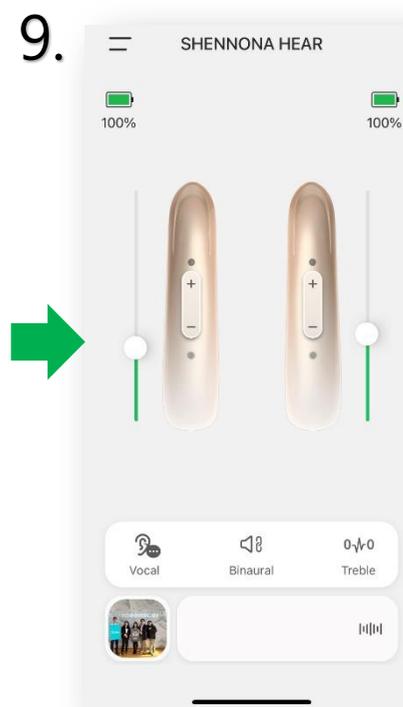

## ● IOS APP 配對流程


STEP1: 手機掃描 QR CODE 配對輔聽器

STEP2: 下載完成，打開依序操作即可完成配對

### 1. APP 下載



### 2. 神寶醫資輔聽器

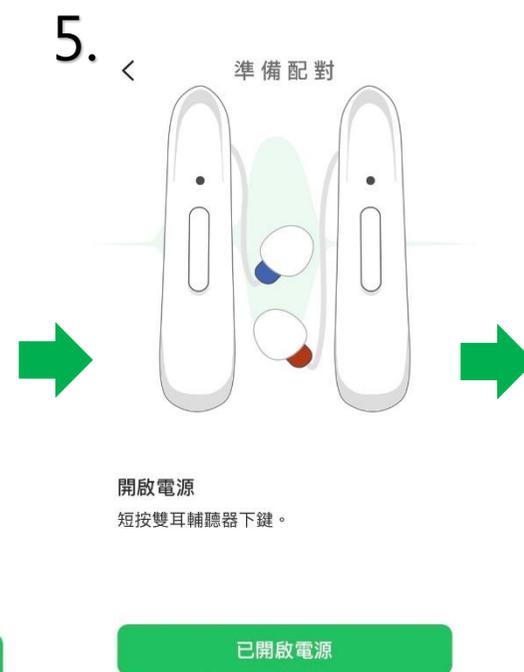



**啟動配對模式**

長按雙耳輔聽器下鍵，看到藍燈閃爍後放開。

藍色指示燈閃爍中



**手動前往系統藍牙配對**

依照說明配對輔聽器，配對完成後返回此頁面。

已配對輔聽器



**自動配對**

掃描盒子側邊的 QR code 與裝置配對。可另外選擇手動配對。

手動配對



裝置綁定中

Shennona Hear

**藍牙配對要求**  
「Shennona\_L\_BLE」想要與您的 iPhone 配對。

取消

配對


綁定



10.



11.

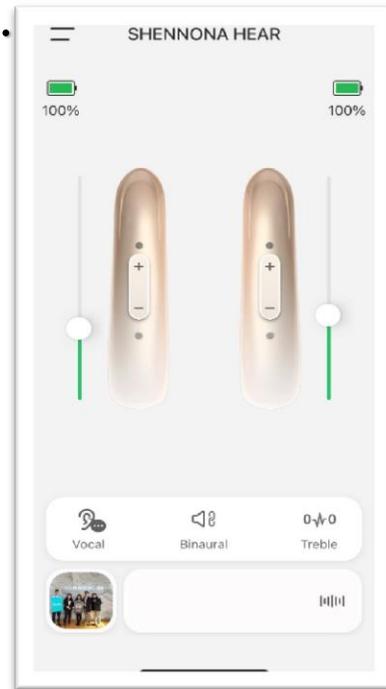

## ● 初次設定聽力補償

- 初次開機時，畫面會直接進入「個人化聽力補償」。若需進行測試請按「測試」依序完成即可達到個人化聽力適配。
- 若無需測試，請按略過。

1.



2.



3.



4.



5.



## ● 個人化聽力補償

- 若需重新設定「個人化聽力補償」功能
- 請依下列圖示進行設定，依序即可完成個人聽力適配。



5.



6.

